

LABORATOIRES URGO

Fiche Technique N° : FT037

Edition N° : 4

Date rédaction : 24.02.04

Page : 1/5

Date de révision : 24.02.07

FICHE TECHNIQUE

**PANSEMENTS / BANDE ADHESIFS MULTI – EXTENSIBLES
SUPPORT NON-TISSE COULEUR CHAIR (non antiseptique)
SKIN COLOUR NON WOVEN STRETCH PLASTERS (non
antiseptic)**

**Désignations / Brand name :
URGO MULTI – EXTENSIBLE – URGO PEAUX SENSIBLES
URGO MULTISTRETCH – SENSITIVE SKIN PLASTERS**

DESTINATAIRES :

- ↳ SERVICE QUALITE
- ↳ SERVICE A.R.E.
- ↳ RESEAU PRESCRIPTION
- ↳ CHEF DE PRODUIT
- ↳ GRAND PUBLIC EXPORT – PRIVATE LABEL

	NOM	SERVICE	SIGNATURE	DATE
APPROBATEUR	JF. HENAULT	CHEF DE PRODUIT		
APPROBATEUR	P.AUZIÈRE	GRAND PUBLIC EXPORT – PRIVATE LABEL		
REDACTEUR	O. MARY	SERVICE A.R.E.		

**PANSEMENTS / BANDE ADHESIFS MULTI -
EXTENSIBLES
SUPPORT NON-TISSE COULEUR CHAIR
(non antiseptique)**

URGO MULTI-EXTENSIBLE – PEAUX SENSIBLES

□ DESCRIPTION :

Pansement multiextensible.

- Support : Non tissé multi-extensible, traité hydrophobe, de couleur chair.
- Masse adhésive : Acrylique émulsion de haute tolérance cutanée.
- Compresse centrale : A haut pouvoir d'absorption avec voile protecteur en polyéthylène.
- Présenté avec deux ailettes de préhension en polyéthylène.
- Présentation pansement sous sachet individuel ou en bande à découper.

□ PROPRIETES :

- Adhésivité prolongée dans le temps et pouvoir compressif grâce aux propriétés d'extensibilité.
- Haute tolérance cutanée : Respect des peaux sensibles.
- Compresse centrale non-tissé : Forte absorption de la compresse et non adhérence à la plaie grâce au voile protecteur.
- Discret : de couleur chair.
- Propre : emballage unitaire pour la forme «pansements vrac».

□ INDICATIONS :

- Protection de petites plaies ou coupures sur toutes les parties du corps.
- Compression après prise de sang pour éviter la formation d'hématome.
- Protection après injection ou prélèvement.

□ MISES EN GARDE ET CONSEILS D'UTILISATION:

- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée. (L'utilisation de produits gras type crèmes peut nuire à l'adhésivité.)
- Renouveler régulièrement.
- Contacter un médecin en cas de suspicion d'infection.

PRESENTATIONS (Codes France Hôpital):

CODE	DIMENSIONS	QTE MINIMUM LIVRABLE	GROUPAGE
<i>PANSEMENTS PREDECOUPES SOUS EMBALLAGE INDIVIDUEL CONDITIONNES EN BOITE DE 1000</i>			
1491	12 x 40 mm	1 boîte de 1000 psts	12 boîtes
1492	20 x 72 mm	1 boîte de 1000 psts	12 boîtes
1493	25 x 72 mm	1 boîte de 1000 psts	6 boîtes
1494	34 x 72 mm	1 boîte de 1000 psts	6 boîtes
1495	53 x 72 mm	1 boîte de 1000 psts	6 boîtes
3141	20 x 72 mm	1 boîte de 50 chapelets de 2 psts	180 boîtes

PANSEMENT EN BANDE A DECOUPER CONDITIONNE EN BOITE (1 BANDE/BOITE)

2979	5 m x 4 cm	1 boîte	78 boîtes
2980	5 m x 6 cm	1 boîte	54 boîtes
2978	5 m x 8 cm	1 boîte	42 boîtes

SPECIFICATIONS:

		SPECIFICATIONS
SUPPORT NU	Nature chimique Grammage Résistance à la rupture : sens 1 sens 2 Elongation : sens 1 sens 2	Non tissé multi-extensible 36 à 44 g/m ² > ou = 95 N > ou = 60 N 100 à 180 % 75 à 175 %
MASSE ADHESIVE	Nature chimique	Dispersion d'un copolymère acrylique dans l'eau
SUPPORT ENDUIT	Grammage de masse Grammage total Pouvoir Adhésif	25 à 35 g/ m ² 61 à 79 g/m ² 2,5 à 6 N/cm
COMPRESSE	Nature chimique Capacité d'absorption*	100% Viscose - recouverte d'un film polyéthylène anti-adhérent. > ou = 400 %
AILETTES DE PREHENSION	Nature chimique	Polyéthylène
DIMENSIONS	<u>A DECOUPER :</u> Longueur Largeur <u>PRE-DECOUPE :</u>	Mini 98 % de la valeur nominale Si < ou = 50 mm : +/- 1,5 mm Si > 50 mm : +/- 2,5 mm < ou = 6 mm : +/- 0,5 mm < 25 mm : +/- 1,5 mm > ou = 25 mm : +/- 2,5 mm
PEREMPTION	5 ans	

* à titre indicatif

STATUT REGLEMENTAIRE :

URGO MULTI-EXTENSIBLE, PEAUX SENSIBLES : En Union Européenne, Dispositifs médicaux marqués CE (Classe I)

Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE

**SKIN COLOUR NON WOVEN STRETCH PLASTERS
(non antiseptic)**

URGO MULTISTRETCH – SENSITIVE SKIN PLASTERS

□ PROPERTIES:

- Flesh-colour hydrophobic non woven backing : soft, aerated, discreet.
- Adhesive mass : Acrylic emulsion of high cutaneous tolerance. Stripe-coating technology.
- Central pad : High absorption capacity .
Protected by an anti-adherent veil preventing it from sticking to the wound.
- Practicality : Presented with two protective wings in polyethylene.

□ INTENDED PURPOSE :

- Protection of small wounds or cuts on all parts of the body, in particular for sensitive skin.

□ WARNINGS AND DIRECTIONS FOR USE:

- Apply on a clean dry skin. (The use of oily products such as creams can affect adhesiveness.)
- Change regularly.
- Contact a physician if you suspect an infection.

□ TECHNICAL DATA :

		SPECIFICATIONS
DESCRIPTION	Self adhesive dressing composed of - a stretch backing, coated with an aqueous dispersion of an acrylic adhesive mass and - a central pad in non woven, surrounded by a non-adherent polyethylene veil.	
BACKING	Chemical nature Weight Tensile strength : MD CD Elongation : MD CD	Skin colour stretch non-woven. 36 to 44 g/m ² > or = 95 N > or = 60 N 100 to 180 % 75 to 175 %
ADHESIVE MASS	Chemical nature	Aqueous dispersion of an acrylic copolymer
COATED BACKING	Weight of the coated mass Total weight Adhesive Power	25 to 35 g/m ² 61 to 79 g/m ² 2,5 to 6 N/cm
PAD	Chemical nature Absorption capacity *	100 % Viscose; surrounded by a non-adherent polyethylene veil. > or = 400 %
PROTECTIVE PAPER	Chemical nature	Polyethylene.
SIZES	<u>DRESSING TO CUT</u> Length Width <u>PRE-CUT DRESSINGS</u>	Mini 98 % of nominal value If < or = 50 mm : +/- 1,5 mm If > 50 mm : +/- 2,5 mm If < or = 6 mm : +/- 0,5 mm If < 25 mm : +/- 1,5 mm If > or = 25 mm : +/- 2,5 mm
SHELF LIFE	5 years	

* for information

□ REGULATORY STATUS :

URGO MULTI-STRETCH, SENSITIVE SKIN: in European Union, Class I Medical Device, CE marked.

Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE (France)