



## Le Coronavirus (Covid-19) et le testeur CO TABATABA®

La transmission du virus peut se faire par contact avec un appareil souillé entre deux patients.

Il est donc indispensable de désinfecter le Tabataba® entre deux patients.

Nous recommandons également le port de gants à usage unique pour les patients lors de la manipulation du TABATABA®.

### Nettoyage du TABATABA®

Le boîtier de l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon imbibé d'un produit bactéricide fongicide générique validé par FIM MEDICAL (voir §4.3). L'usage de spray n'est pas recommandé car un jet mal dirigé pourrait endommager la cellule.

Le piègeur est à usage unique et doit être changé systématiquement après chaque patient.

La pipette est à usage unique et doit être changée systématiquement après chaque patient.

**Attention :** Risque de contamination croisée en cas de réutilisation des consommables à usage unique

**Attention :** Ne pas stériliser l'appareil, ni ses accessoires

**Attention :** Les accessoires souillés doivent faire partie d'une collecte sélective pour déchets biologiquement souillés (DASRI).

Nous recommandons de demander au patient de se désinfecter les mains avant de manipuler l'appareil, ou bien le port de gants à usage unique.

Du fait d'un très grand nombre de marques et de références de lingettes décontaminantes présentes sur le marché, la société FIM MEDICAL a validé pour ses produits des références n'altérant pas l'aspect ni la résistance des matières plastiques des coques de ses appareils.

La société FIM MEDICAL valide, pour la décontamination des ses produits, l'utilisation des lingettes ou chiffons imbibés ci-dessous :

Alcool isopropylique 70 % / Bactynil® Lingettes désinfectantes / Clorox® Healthcare Bleach / Sani-Cloth® Bleach / Sani-Cloth® Plus / Sani-Cloth® HB / Super Sani-Cloth® / Sanicloth® AF3 / Formula 409® / Virex® Plus / Mikrozyd AF - Schülke



**ET**



Réf : 7457N



Réf : 9745



**USAGE UNIQUE**