

Tire-tiques

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant toute utilisation de ce dispositif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 Le tire-tique Tick Twister® est un dispositif conçu par la société H3D pour procéder au retrait des tiques de différentes tailles, rapidement, entièrement et sans douleur chez l'Homme.

- Que contient cette notice ?**
1. Qu'est-ce que le tire-tique Tick Twister® ?
 2. Quelles sont les recommandations d'utilisation ?
 3. Comment utiliser le tire-tique Tick Twister® ?
 4. Précautions et avertissements
 5. Que faire en cas de problèmes ?
 6. Quels sont les effets secondaires éventuels ?
 7. Contenu de l'emballage
 8. Autres informations

1. Qu'est-ce que le tire-tique Tick Twister® ?
 Le tire-tique Tick Twister® permet de retirer complètement, rapidement, sans douleur et en toute sécurité les tiques de différentes tailles, chez l'Homme, sans utilisation de produits chimiques.
 Le tire-tique Tick Twister® s'utilise :
 • Sur soi ou toute autre personne, quel que soit l'âge (bébé à personne âgée) ;
 • Partout sur le corps ;
 • Quel que soit le lieu/environnement.
 • Sauf contre-indication, le tire-tique Tick Twister® peut être utilisé par toute personne de plus de 14 ans.

Bénéfices cliniques :
 Indépendamment de la performance clinique qui consiste à pouvoir retirer complètement et en toute sécurité des tiques de différentes tailles, H3D ne revendique aucun bénéfice clinique à l'utilisation de ses tire-tiques. H3D ne revendique notamment aucun bénéfice clinique concernant les infections et leurs conséquences qui peuvent arriver indépendamment du bon retrait de la tique, en fonction du temps durant lequel elle était fixée sur le patient.

2. Quelles sont les recommandations d'utilisation ?
 - Dispositif destiné exclusivement au retrait des tiques.
 - Retirer le plus rapidement possible une tique une fois sa présence détectée.
 - Utiliser la bonne taille de tire-tique en fonction de la taille de la tique :
 • Petite : pour les larves - moins de 1mm.
 • Moyenne : pour les nymphes - entre 2 mm et 3 mm et tiques adultes entre 5 mm et 8 mm.
 • Grande : pour les tiques adultes gorgées – de 9 jusqu'à 11 mm.
 - L'utilisation est déconseillée sur des zones où la tique est très difficile d'accès, comme le pavillon de l'oreille. Dans ce cas, consulter un médecin.
 - Ne pas utiliser de produits chimiques (alcool, éther, huile,

huile essentielle, désinfectant...) avant ou pendant le retrait.
 - Désinfecter la zone de piqûre à l'aide d'un produit désinfectant grand public à base d'alcool.
 - Conserver les tire-tiques dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et limitant les risques de déformation et de détérioration de la fente.

3. Comment utiliser le tire-tique Tick Twister® ?
a. Le retrait de la tique s'effectue par rotation, ce qui permet de retirer intégralement la tique, sans laisser son rostre planté dans la peau du patient.
 • Choisissez le tire-tique le plus adapté à la taille de la tique.
 • Glissez le tire-tique sous la tique, en l'abordant par le côté, jusqu'à ce qu'elle soit maintenue.
 • TOURNEZ le tire-tique dans le sens de votre choix. La tique se détache d'elle-même après 2 ou 3 tours.



b. Une fois la tique retirée :
 • Désinfectez la zone de piqûre avec un antiseptique.
 • Collez la tique dans un morceau de ruban adhésif replié sur lui-même et jetez l'ensemble à la poubelle.

c. Nettoyez le tire-tique après chaque utilisation :
 • Utilisez un produit désinfectant grand public à base d'alcool ou utilisez de l'eau et de savon ;
 • Nettoyez par frottement par lingette, ou par chiffon plus ou moins doux ;
 • Nettoyez à la main ;
 • Séchez par frottement avec une lingette, ou avec un chiffon plus ou moins doux, ou laissez sécher par évaporation.

d. Après utilisation et nettoyage du tire-tique, le conserver dans sa boîte de rangement (si la référence achetée en propose une) ou le placer dans un endroit limitant les risques de détérioration.

e. Ce dispositif est réutilisable.
 Cependant, en cas de dégradation telle que la casse, la déformation du dispositif ou la dégradation de la fente, le dispositif peut être :
 • Recyclé dans certaines filières spécialisées ;
 • Jeté dans la poubelle (voir consignes de tri locales).

4. Précautions et avertissements
 ⚠️ Veuillez lire attentivement les indications ci-dessous, afin de vous assurer que le dispositif est utilisé dans les meilleures conditions et en toute sécurité.
 - Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 14 ans.
 - Dans l'impossibilité de retirer la tique, ou si une partie de la tique, n'a pas pu être retirée, consulter un médecin.
 - Ne pas utiliser le tire-tique si :
 • Celui-ci a changé de couleur, ou est déformé/tordu, ou présente de la perte de matière ;
 • La fente du tire-tique est déformée/abîmée ;
 • Si le nettoyage efficace du tire-tique n'a pas été possible et qu'il reste des résidus.
 - Ne pas tirer sur la tique et éviter de la comprimer. Cela pourrait couper le rostre et/ou augmenter le risque d'infection.
 - Ne pas tordre ou écraser le tire-tique lors de la manipulation

- Après une piqûre de tique, consulter sans attendre un médecin si :
 • Des rougeurs / symptômes inhabituels apparaissent,
 • Une inflammation de la zone de piqûre apparaît ;
 • Si la tique est coupée et qu'une partie est toujours dans la peau ;
 • Le retrait de la tique est impossible.
 - Ne pas utiliser d'objet pointu ou abrasif pour procéder au nettoyage de la fente du tire-tique. Cela pourrait endommager le tire-tique et nuire au retrait efficace des tiques.
En cas de dysfonctionnement, appelez H3D au +33 (0)4 74 75 86 72 et retournez le tire-tique à l'adresse suivante : H3D – ZA Sous la Combe, 01590 LAVANCIA-EPERCY – FRANCE.


5. Que faire en cas de problèmes ?
 • Si des rougeurs, symptômes inhabituels, inflammation de la zone de piqûre apparaissent, consultez un médecin. Causes possibles : 1 – Infection par une bactérie transmise par la tique. 2 – Transmission de la maladie de Lyme par les bactéries contenues dans le sang de la tique.
 • Si la tique a été coupée par inadvertance lors du retrait et une partie est toujours dans votre peau, consultez un médecin pour procéder à l'extraction des parties de la tique toujours présentes dans la peau du patient et/ou changez de tire-tique.
 Causes possibles : 1 – Mauvaise manipulation du tire-tique. 2- Fente ou tire-tique déformés/abîmés.
 • Si la tique est toujours implantée dans la peau du patient malgré des tentatives de retrait avec le tire-tique, consultez un médecin.
 Causes possibles : 1 – Mauvaise manipulation du tire-tique. 2 – Implantation de la tique dans une zone difficile d'accès avec le tire-tique.
 • Si le tire-tique présente une forme, couleur différente de celle d'origine et / ou si la fente du tire-tique ne semble pas nette (perte de matière, bosses...), changez de tire-tique. Causes possibles : usure du temps du tire-tique.

6. Quels sont les effets secondaires éventuels ?
 Le tire-tique Tick Twister® est contre-indiqué pour une manipulation sur soi ou sur une autre personne :
 - présentant des tremblements réguliers,
 - présentant des handicaps, troubles, maladies neurologiques,
 - de moins de 14 ans.

Une contamination par la tique peut avoir eu lieu avant son retrait ou si le retrait n'a pas été fait suivant les indications. L'utilisation du tire-tique Tick Twister® ne peut agir sur l'éventuelle apparition ou évolution des maladies.

7. Contenu de l'emballage
 Le dispositif tire-tique Tick Twister® est composé, en fonction des différentes références de ventes, des composants suivants :

- 1 x Tire-tique petite taille - 0,420 g - 3,6 x 0,6 cm
Pour les larves (0,04 mm à 1mm)
- 1 x Tire-tique moyenne taille - 0,750 g - 4,7 x 0,8 cm
Pour les nymphes et tiques adultes (2 mm à 8mm)
- 1 x Tire-tique grande taille - 1,430 g - 6,3 x 1,3 cm
Pour les tiques adultes gorgées (9mm à 11mm)

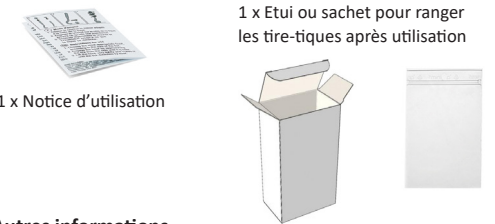

1 x Notice d'utilisation
 1 x Etui ou sachet pour ranger les tire-tiques après utilisation

8. Autres informations
Déclaration du fabricant
 H3D déclare que les tire-tiques Tick Twister® sont des dispositifs médicaux marqués CE en Mai 2021. Ces dispositifs sont conformes aux exigences générales de sécurité et de performance du Règlement Européen 2017/745.

Matériorivigilance
 En cas d'un incident grave survenu ou en cas de probabilité qu'un incident grave survienne lors de l'utilisation du dispositif, il est demandé aux utilisateurs de signaler dans les plus brefs délais l'événement à H3D et à l'ANSM, autorité compétente Française, à l'adresse suivante <https://ansm.sante.fr/documents/referenc/reference/declarer-un-effet-indesirable>
 Pour les autres pays voir la liste des autorités compétentes à contacter à l'adresse https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en#nca rubrique « vigilance contact point »

Marque commerciale
 « Tick Twister » est une marque déposée.

Droit d'auteur (copyright)
 © H3D
 Tous droits sont réservés. Aucune partie de ce document ne doit être reproduite, transcrite, transmise, diffusée, modifiée, fusionnée, traduite dans une langue quelconque ou utilisée sous quelque forme que ce soit – graphique, électronique, ou mécanique, y compris mais non limités, aux systèmes de photocopie, d'enregistrement ou de stockage et de récupération de l'information, sans l'accord écrit préalable de H3D. Des copies du présent document sont illégales.

Modifications
 Les informations données dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement. Nous avons fait nos meilleurs efforts pour assurer l'exactitude des informations données dans ce document. Si vous identifiez des informations incorrectes, veuillez contacter le service client à l'adresse mail suivante : info@otom.com ou par téléphone au +33 (0)4 74 75 86 72.

Contactez-nous / Aide
 En cas de question ou de problème avec le tire-tique Tick Twister®, contactez-nous sans attendre sur notre boîte mail à info@otom.com ou par téléphone au +33 (0)4 74 75 86 72 du lundi au vendredi de 09H00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

H3D - ZA Sous la Combe
 01590 LAVANCIA - FRANCE
 Tel: +33(0)4 74 75 86 72
info@tick-twister.com
www.tick-twister.com

CE Année de marquage : 2022
 Produits conformes au Règlement 2017/745

Date d'impression : 01-2023
 Version FR/EN-2023