

## Gouttière de perfusion, réf. 100BIA100



### Description

- Gouttière de perfusion pour bras.
- Dispositif de maintien conçu pour faciliter l'immobilisation du bras.

### Caractéristiques techniques

- Matières : - Mousse : en polyuréthane ;  
- Housse : en PVC.
- Dimensions : Lo 420 x la 140 x H 90 mm.
- Poids net : 198 g.
- Mode d'emploi : ouvrir les bandes auto-agrippantes, poser le bras à l'intérieur de la gouttière, fermer les bandes auto-agrippantes.
- Dispositif stérile : non.
- Stérilisation : non.
- Nettoyage : pour la mousse, utiliser de l'eau savonneuse ou des produits désinfectants. Nettoyage à la vapeur saturante sans ajout de formol. Séchage à l'air ambiant préconisé. Pour la housse, résiste à un lavage à 90°C, mais 60°C conseillé.
- Substances impropres : le chlore.