

Set de soins accouchement avec pinces kocher, réf. 100RAA



Description

- Le set de soins accouchement avec pinces kocher est un set de soins à utiliser lors d'un accouchement par voies naturelles.
- Le set comporte le nécessaire pour délimiter un champ stérile, accueillir le bébé et couper le cordon ombilical.
- Il s'agit d'un dispositif stérile, à usage unique.
- La dénomination commune du set de soins selon la nomenclature Euro-Pharmat est « Trousse opératoire ».
- La dénomination commerciale est « Custom pack d'accouchement N°1 ».

Caractéristiques techniques

- **Composition :**
 - 1 sachet (420 x 600 mm) ;
 - 1 plateau (32.5 x 26.5 x 5.2 cm) ;
 - 1 champ non-tissé PE (110 x 110 cm) ;
 - 2 carrés d'essuyage Airlaid (30 x 35 cm) ;
 - 1 champ non-tissé PE sous fessier (53 x 75 cm) + poche graduée ;
 - 1 champ non-tissé gaufré accueil bébé (72 x 100 cm) ;
 - 1 champ non-tissé PE (70 x 90 cm) ;
 - 10 compresses gaze (10 x 10 cm) 12 plis 17 fils ;
 - 2 pinces inox Kocher à griffes (Longueur de 18 cm) ;
 - 1 paire de ciseaux inox Mayo (Longueur de 17 cm) ;
 - 1 étiquette de traçabilité.
- **Matériaux :** absence de Latex, de DBP/BBP/DIPP/DEHP
- **Type de dispositif :** stérile, à usage unique.
- **Stérilisation :** à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement :** unitaire.
- **Conditions de stockage :** à conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
- **Durée de vie :** se référer à l'étiquetage du produit.
- **Conformité :** dispositif médical de classe I.

Mode d'utilisation

- Le champ enveloppant sert de champ de table.
- L'opérateur se lave les mains et se les sèche avec les carrés d'essuyage.
- Il place le champ sous-fessier sous les fesses de la patiente et l'autre champ sur le ventre de la patiente pour délimiter la zone stérile.
- Avec 4 compresses, il effectue la détersion, le rinçage, le séchage et l'antiseptie du périnée.
- Une fois la naissance effectuée, le nouveau-né est emmaillotté dans le champ accueil bébé.
- Les pinces kocher permettent de clamper le cordon ombilical qui sera sectionné avec les ciseaux.
- Le plateau permet de recueillir les déchets.
- **Précautions d'emploi :** pour prévenir tout risque d'ouverture de la pince Kocher, vérifier après clampage que les dents soient bien serrées et surveiller régulièrement son maintien sur le cordon ombilical.
Lors d'une épisiotomie, glisser systématiquement les doigts entre les ciseaux et la tête du nouveau-né pour assurer sa protection.
La graduation de la poche du champ sous fessier est donnée à titre indicatif, elle n'est pas garantie.
- **Contre-indications :** sensibilité connue à l'un des composants.