

Thermomètre flexible large écran, réf. 100YWA



Description

- Le thermomètre dispose d'une sonde flexible pour faciliter la mesure de la température des enfants ou bébés.
- Simple d'utilisation, il suffit d'allumer le thermomètre flexible grâce au bouton ON/OFF. Ensuite, prendre la mesure par voie rectale pour obtenir une température précise et rapide.
- La température peut également être prise au niveau de la bouche ou de l'aisselle. Dans ces cas de figure, la prise de mesure est de 3 à 5 minutes.
- Une sonnerie d'alarme de 3 bips sonores répétés retentit si la température est supérieure à 37,8°C, au dessous, il s'agira de bips sonores continus pendant 10 secondes.
- Pour éteindre le thermomètre, il suffit d'appuyer sur le bouton on/off ou d'attendre l'arrêt automatique au bout de 10 minutes.

Caractéristiques techniques

- **Equipement :** - Pointe flexible ;
- Large écran ;
- Alarme pour température supérieure à 37.8°C ;
- Indicateur de batterie faible ;
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes.
- **Dimensions de l'écran :** L 27 x H 22 mm.
- **Alimentation :** une pile bouton 1.5V (réf. 4920)
- **Temps de prise de mesure :** en 8 à 10 sec.
- **Plage de mesure :** de 32 à 43.9°C.
- **Température de fonctionnement :** de 10 à 40°C.
- **Conditions de stockage :** stocker à une température de -10 à 60°C.