

## Set de soins accouchement, réf. 100QZA



### Description

- Le set de soins pour l'accouchement est destiné à être utilisé dans le cadre d'un accouchement par les voies naturelles.
- La dénomination commune du set de soins selon la nomenclature Euro-Pharmat est « Trousse opératoire ».
- La dénomination commerciale du set de soins est « Trousse d'accouchement N°3 ».

### Caractéristiques techniques

- **Composition :** - 1 sachet (300 x 420 mm) ;  
- 1 champ NT/PE (110 x 110 cm) ;  
- 2 carrés d'essuyage Airlaid (30 x 35 cm) ;  
- 1 champ non-tissé PE (53 x 75 cm) sous fessier avec poche graduée ;  
- 1 champ non-tissé gaufré (72 x 100 cm) accueil bébé ;  
- 1 champ non-tissé PE (70 x 90 cm) ;  
- 15 compresses gaze (10 x 10 cm) ;  
- 12 plis ;  
- 17 fils ;  
- 1 étiquette de traçabilité.
- **Produit stérile :** oui, à usage unique.
- **Stérilisation :** à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement :** unitaire.
- **Conditions de stockage :** à conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
- **Durée de vie :** se référer à l'étiquetage du produit.
- **Conformité :** dispositif médical répondant à la règle 4 section 1, de classe I. Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485.
- **Précautions d'emploi :** La graduation de la poche du champ sous fessier est donnée à titre indicatif, elle n'est pas garantie.
- **Contre-indications :** sensibilité connue à l'un des composants (Absence de latex, de DBP/BBP/DIPP/DEHP).

### Mode d'utilisation

- Le **champ enveloppant** sert de champ opératoire sur la table d'accouchement.
- Le praticien se lave les mains et se les sèche avec les **carrés d'essuyage**.
- Il installe le **champ sous-fessier** sous les fesses de la patiente et l'autre champ sur le ventre de la patiente pour délimiter la zone stérile.
- Avec **8 compresses**, il effectue la détersion, le rinçage, le séchage et l'antisepsie du périnée. Les autres compresses permettent d'absorber le sang.
- Une fois la naissance effectuée, le nouveau-né est emmaillotté dans le **champ accueil bébé**.