

## Ceinture pelvienne Sam Sling II



101MBA100 / 01291 / 101MBA102



101NYA (version militaire)

### Description


- **SAM SLING** est un système approuvé scientifiquement.
- La ceinture pelvienne permet pour la première fois d'appliquer, maintenir et contrôler une stabilisation constante grâce à un dispositif de déclenchement dès que la tension est optimale.
- La ceinture Sam Sling est destinée à un patient unique, elle est non invasive et facile à mettre en place.
- Les chirurgiens spécialisés dans la traumatologie s'accordent à dire toute l'importance de la réduction et de la stabilisation précoce d'une fracture Pelvienne pour limiter les hémorragies.

### Caractéristiques techniques


- **Équipement** : la ceinture pelvienne est dotée d'une boucle se bloquant automatiquement lorsque la sangle atteint la traction optimale autour du bassin, en fonction de la morphologie de la victime (traction de 13, 15 et 18 kg).
- **Matériaux** : sangle réglable par Velcro™ mobile.
- **Compatibilité** : rayons X et RMN.
- **Dispositif** : à usage unique.
- **Conformité** : conforme aux nouvelles recommandations de Juin 2018 relatives aux unités d'enseignement PSE1 et PSE2 concernant la contention pelvienne.

Référence	Version	Coloris	Taille	Diamètre
101MBA100	Civile	Bleu/Orange	Small	de 69 à 119 cm
01291	Civile	Bleu/Orange	Medium	de 81 à 127 cm
101MBA102	Civile	Bleu/Orange	Large	de 91 à 152 cm
101NYA	Militaire	Vert foncé	Medium	de 81 à 127 cm


### Mise en place de la ceinture pelvienne

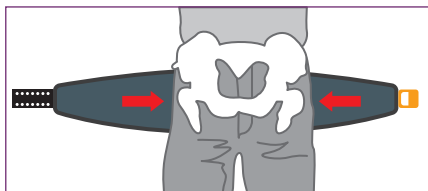

- **Étape 1** : placer la sangle pelvienne sous le patient au niveau des hanches.

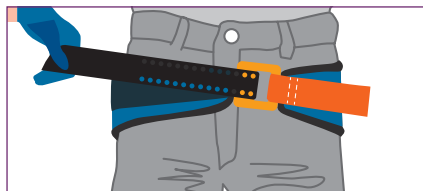

- **Étape 2** : passer la sangle noire à travers la boucle et tirer.

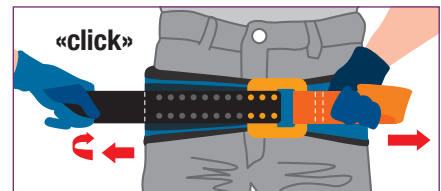

- **Étape 3** : tenir la poignée et tirer la sangle noire dans une direction opposée jusqu'à entendre et sentir la boucle « cliquer ». Maintenir la tension et accrocher immédiatement la sangle noire sur la surface de la ceinture. Un second clic peut retentir lorsque la sangle de fixation pelvienne est sécurisée.