

Pince ôte-agrafes médicale à usage unique, réf. 102AJA



Description

- Pince ôte-agrafes chirurgicale pour le retrait des agrafes chirurgicales cutanées.
- Elle est utilisée lors des interventions chirurgicales ou en cabinet médical.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - En acier inoxydable (AISI 304) ;
- Sans latex/DBP/BBP/DIPP/DEHP.
- **Contre-indications** : il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.
- **Dimensions** : longueur de 10 cm.
- **Mode de stérilisation** : stérilisée à l'oxyde d'éthylène.
- **Type de dispositif** : dispositif médical à usage unique de Classe IIa.
- **Conditionnement** : unitaire sous blister souple, avec embout de protection sur la partie coupante de la pince.
- **Conditions de stockage** : conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
- **Durée de validité du produit** : se référer à l'étiquetage du produit.
- **Conformité** : normes applicables Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485.
- **Date de première mise sur le marché dans l'UE** : 31/12/2008.

Mode d'emploi

- Insérer délicatement les mâchoires de la pince ôte agrafe entre la peau et le centre de l'agrafe.
- Serrer doucement les deux branches de la pince ôte agrafes pour relever les griffes de l'agrafe. Celle-ci s'ouvre.
- Dégager l'agrafe avec la pince ôte agrafe fermé.
- La déposer sur une compresse sèche.
- Répéter autant de fois que nécessaire pour une même plaie.