

## Kit 2 brassards pour tensiomètre DD medical Soft Cuff®, réf. 101YQC




### Description

- Le kit 2 brassards pour tensiomètre DD medical Soft Cuff® se compose d'un brassard enfant et d'un brassard adulte large.
- Les brassards sont équipés d'un tube pour une prise de tension artérielle non invasive.
- Ils sont souples à fermeture auto-agrippante, faciles à adapter sur le bras du patient.
- Fiabilité : un INDEX et une plage Min Max permettent de valider rapidement si le brassard ou le cuissard est adapté au membre du patient.
- L'indication « artère » portée sur le brassard permet de parfaitement positionner celui-ci, la poche se trouvant automatiquement centrée sur le passage de l'artère.
- Sécurité : afin de lutter contre les maladies nosocomiales, le tissu des brassards est antimicrobien grâce à un traitement spécifique.


### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Brassard en tissu avec enduction et traitement antibactérien ;  
- Poche en tissu enduit PU ;  
- Sans latex.
- **Coloris** : tube gris.

Désignation	Nbre de sortie	Circonférence		Dimensions en mm				
		Min.	Max.	A	B	C	D	E
Brassard enfant	1	11 cm	22 cm	348	97	180	80	85
Brassard adulte large	1	33 cm	41 cm	633	174	330	150	75

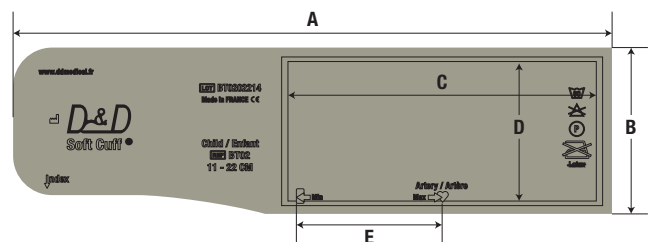

### Mode d'emploi

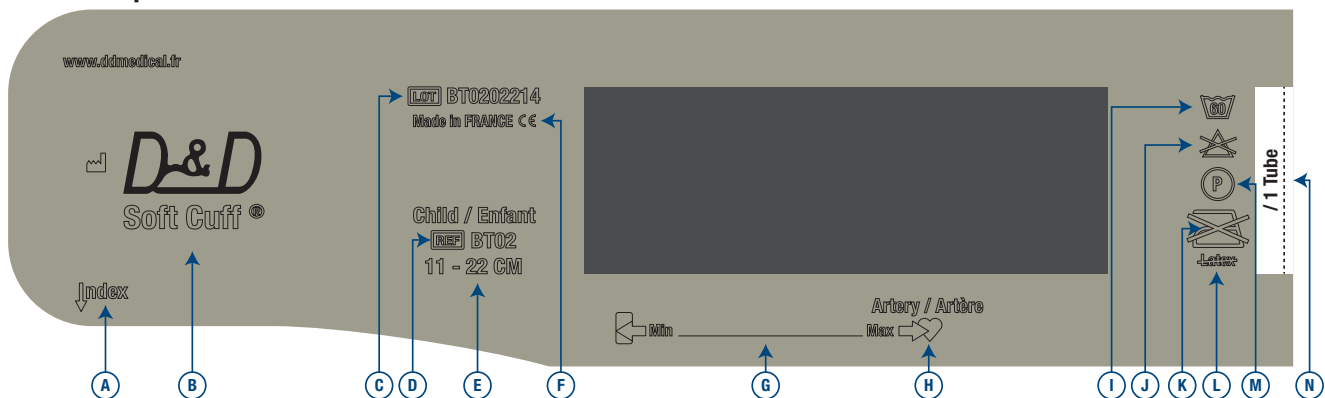

A - Indication de l'index  
B - Marque de produit  
C - Numéro de lot de fabrication  
D - Nom et référence du produit  
E - Plage d'utilisation du produit

F - Marque d'origine du produit  
G - Plage de validité d'utilisation du produit  
H - Indication de placement de l'artère  
I - Lavage en machine à 60°C maximum  
J - Ne pas utiliser de blanchisseur

K - Ne pas repasser  
L - Sans Latex  
M - Nettoyage à sec avec tous les solvants possible  
N - Etiquette indiquant le nombre de tube

- **Utilisation du dispositif** : - Sélectionner un brassard adapté à la morphologie du patient. La taille et la plage d'utilisation sont indiquées sur le brassard ;  
- Positionner le centre de la poche représenté, par l'indication « ARTERE », sur l'axe de l'artère humérale ;  
- Envelopper correctement le brassard autour du membre et assurer son maintien à l'aide du système de fixation prévu ;  
- Quand le brassard est correctement positionné la procédure de mesure de la tension artérielle peut commencer.
- **Nettoyage du brassard à sec** : - Vaporiser une mousse détergente, désinfectante, bactéricide sur le brassard, en prenant soin de répartir le produit ;  
- Laisser agir 15 minutes ;  
- Le rinçage est inutile, essuyer à l'aide d'une lingette à usage unique. Produit recommandé : Surface'Safe / Anios