

Sacs vomitoires en polyéthylène, réf. 103IEA



Description

- Les sacs vomitoires en polyéthylène absorbent et éliminent le vomi.
- Le tampon alveol-Technology® assure une absorption rapide et ne perd ni micro-cellulose, ni poudre.
- Les sacs vomitoires en polyéthylène possèdent des rabats pour un maintien hygiénique et des liens coulissants pour la fermeture.
- Ce produit est à usage unique, ne pas réutiliser.
- Dispositifs médicaux de gestion sécurisée des excréta pour patients alités, en situation d'urgence, ou dépendants, pour la maîtrise du risque infectieux à l'Hôpital (Médecine Chirurgie Obstétrique, Réanimation, Urgences, Soins de Suite et de Réadaptation, de Longue Durée), en EHPAD et pour le Maintien à Domicile, en Transport Sanitaire et en cas d'Urgence.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : sac et tampon super-absorbant hypoallergéniques - Testés dermatologiquement.
- **Matériaux** : - Extérieur du sac : en polyéthylène 30µ, matière résistante ;
- Intérieur : micro-cellulose et polymères d'acrylate de sodium (super-absorbant) ;
- Enveloppe : papier absorbant ;
- Sans latex.
- **Dimension d'un sac** : 25 x 25 cm.
- **Capacité d'absorption** : 600 ml/ 20 oz de fluides biologiques (Méthode adaptée de la norme ISO 17190-5 : 2001 - Solution saline à 0,9%).
- **Conditionnement** : une boîte qui contient un rouleau de 20 sacs.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe I, à usage unique.
- **Conformité** : Chaque produit est identifié par un numéro de lot, non périssable. Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Mode d'emploi

- **Simple et rapide** : - Ouvrir la boîte ;
- Détacher le 1er sac du rouleau ;
- Maintien du sac totalement hygiénique grâce à la technologie «100% mains protégées»® (brevet déposé) ;
- Après usage, retirer le sac plein ;
- Tirer sur les liens et nouer. Si nécessaire, renouer le sac lui-même ;
- Jeter dans les déchets ménagers ou sacs DASRI selon le protocole en vigueur.
- **Elimination** : - Ne pas jeter dans les toilettes ;
- Jeter dans les déchets ménagers/DAOM ou, en cas d'infections et/ou traitement de chimiothérapie, en DASRI. Suivre le protocole de l'établissement.
En cas d'incinération, ne rejette aucun dérivé chloré ni dioxine.
- **Précautions d'emploi** : Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi.
En cas d'ingestion consulter un médecin et lui montrer l'emballage.
Ne pas laisser à portée des enfants ou des personnes non responsables (risque d'étouffement).