

Sacs protégés seau en polyéthylène, réf. 102RDA



Description

- Sac hygiénique en polyéthylène avec liens coulissants pour la fermeture.
- Contient un tampon très absorbant sans perte de micro-cellulose ou poudre dans le sac ou sur la peau.
- Dispositifs médicaux de gestion sécurisée des excréta pour patients alités, en situation d'urgence, ou dépendants, pour la maîtrise du risque infectieux à l'Hôpital (Médecine Chirurgie Obstétrique, Réanimation, Urgences, Soins de Suite et de Réadaptation, de Longue Durée), en EHPAD et pour le Maintien à Domicile, en Transport Sanitaire et en cas d'Urgence. Pour utilisation sur Bassin de lit, Chaise garde-robe, WC, comme sac vomitoire ou urinal masculin.

Caractéristiques techniques

- **Composition :** Sac et tampon super-absorbant hypoallergéniques – Testés dermatologiquement
- **Matériaux :**
 - Sac : Polyéthylène : 30µ ;
 - Tampon super-absorbant : enveloppé alveol-Technology® (brevet déposé, tampon enveloppé et alvéolé) ;
 - Intérieur : Micro-Cellulose & Polymères d'Acrylate de Sodium Super Absorbants ;
 - Enveloppe : papier absorbant.

- **Dimensions :** la 40 x Lo 52 cm.
- **Capacité d'absorption :** 600 ml/20oz de fluides biologiques (Méthode adaptée de la norme ISO 17190-5 :2001 – Solution saline à 0,9%).
- **Type de dispositif :** dispositif médical.
- **Conditionnement :** boîte de 20 sacs.
- **Conformité :** Chaque produit est identifié par un numéro de lot, non périssable. Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Code douanier : 48189010 (selon la législation européenne en vigueur).

Mode d'emploi

- Ouvrir la boîte et détacher du rouleau le premier sac.
- Placer le sac sur le seau (tampon au fond du sac).
- Après usage, retirer le sac plein, tirer sur les liens et nouer.
- Si nécessaire, renouveler le sac lui-même.
- Jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur. Ne pas jeter aux toilettes.
En cas d'incinération, ne rejette aucun dérivé chloré ni dioxine.
- **Précautions d'emploi :**
 - Produit à usage unique ;
 - Ne pas réutiliser après emploi ;
 - En cas d'ingestion consulter un médecin et lui montrer l'emballage ;
 - Ne pas laisser à portée des enfants ou des personnes non responsables (risque d'étouffement).