

## Thermomètre digital pour enfant, réf. 103JQA



### Description

- Ce thermomètre digital permet de prendre la température corporelle d'un bébé ou d'un enfant.
- Doté d'un design coloré avec tête d'ours, agréable et réconfortant pour les petits lors de la prise de température.
- Simple d'utilisation, il suffit d'allumer le thermomètre grâce au bouton ON/OFF et de prendre la température.
- La température peut être prise par voie rectale ou par voie orale.
- Lecture aisée du résultat sur l'écran LCD.
- Le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes pour économiser les piles s'il n'a pas été éteint manuellement.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements** : Ecran LCD
- **Dimensions de l'écran LCD** : L 14 x H 6 mm.
- **Poids** : 23 g.
- **Plage de mesure** : 32°C à 42°C.
- **Alimentation** : fonctionne à pile (fournie).
- **Mode d'utilisation** : par voie rectale (plus rapide et précise) ou buccale (temps de mesure plus long).
- **Conditionnement** : unitaire.
- **Garantie** : 1 an.

### Mode d'emploi

- Allumer le thermomètre grâce au bouton ON/OFF.
- Prendre la température en restant dans la même position jusqu'à ce que le signal sonore indique la fin de la prise de température.
- Lecture aisée du résultat sur l'écran LCD.
- Eteindre le thermomètre grâce au bouton ON/OFF, sinon il s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes.
- **Précautions d'emploi** : la sonde du thermomètre bébé doit être désinfectée au préalable avec un tampon imprégné d'alcool.