

Applicateur de granulés hémostatiques Celox, réf. 103LKA



Description

- L'applicateur de granulés hémostatiques Celox est un produit d'urgence à utiliser en cas d'hémorragie externe.
- Il permet de limiter ou d'arrêter complètement une hémorragie.
- Simple d'utilisation, il ne requiert pas de formation particulière.
- L'applicateur de granulés hémostatiques Celox se présente sous la forme d'une seringue.
- Conçu pour les plaies difficiles d'accès avec une ouverture trop étroite.
- Les granulés de chitosane sont un dérivé purifié de la chitine de crevette.
- Les granulés adhèrent aux tissus humides de la plaie. Mélangés au sang, ils se durcissent pour créer un gel résistant (Clot). Ce gel crée en moins de 3 minutes un caillot de sang qui permet de limiter ou arrêter l'hémorragie.
- **Conseil d'utilisation** : insérer l'applicateur de granulés hémostatiques Celox directement dans la plaie afin d'atteindre l'origine du saignement.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Granulés hémostatiques à base de Chitosane ;
- Sans Latex ;
- Sans Phtalate.
- **Format** : sous forme de seringue.
- **Contenance** : 6 g de granulés Chitosane.
- **Dimensions** : - Seringue : L 14 x Ø 1.27 cm ;
- Emballage : H 22.9 x la 9.5 x H 1.27 cm.
- **Poids** : 33 g (avec emballage).
- **Type de dispositif** : dispositif stérile à usage unique.
- **Type de stérilisation** : R rayonnement gamma
- **Conditions de stockage** : conserver à température ambiante.
- **Conformité** : - Marquage CE515131 ;
- Indice de classement CE : III, Annexe IX, R 17, directive 93/42/EEC ;
- Validité marquage CE : du 08/01/2019 au 18/11/2022.