

## Compresse hémostatique stérile Coalgan<sup>®</sup>, réf. 104NRB100



- ✓ Permet de comprimer la plaie.
- ✓ Stoppe le saignement.
- ✓ Favorise la cicatrisation tout en protégeant la plaie.
- ✓ Retrait sans douleur.
- ✓ Adaptée aux plaies des muqueuses.

### Description

- Pansement hémostatique pour stopper rapidement les saignements et favoriser la cicatrisation des plaies superficielles cutanées et muqueuses (saignement de nez, saignement buccal, saignement de l'arcade sourcilière, brûlure superficielle et suintante...).
- Adaptée à tous (bébés, enfants, personnes âgées...) y compris aux patients avec troubles de l'hémostase congénitaux (sous traitements anticoagulants, AVK...) ou acquis (hémophilie...) et avec facteurs de retard de cicatrisation (diabète...).



### Caractéristiques techniques

- **Composition** : Alginate de calcium issu d'une algue marine (laminaria hyperborea). Non-tissé.
- **Type de dispositif** : Dispositif médical stérile à usage unique de Classe IIb.
- **Dimensions** : la 3 x Lo 5 cm.
- **Conditionnement** : boîte de 5 compresses absorbantes stériles, sous emballage individuel.
- **Conformité** : DM Classe IIB, CE 0459.



### Mode d'action

- **Compresse bio-active** (échange des ions sodium du sang avec les ions calcium de la compresse) :
  - Contribue à la formation d'un caillot sanguin stable ;
  - Favorise la cicatrisation en activant son processus naturel ;
  - Permet un retrait sans douleur grâce à la gélification des fibres d'alginate de calcium.



### Conseils et recommandations

- Humidifier uniquement avec du sérum physiologique (NaCl à 0,9 %) à la pose et au retrait.
- Ne pas essayer de retirer les éventuelles fibres qui subsistent dans la plaie au retrait, elles s'élimineront naturellement.
- Un saignement persistant nécessite un avis médical.