

Fauteuil de prélèvement à roulettes, réf. 104UXB*



- ✓ Manchettes de prélèvement ajustables en hauteur avec un levier
- ✓ Inclinaison des manchettes de prélèvement ajustables par levier
- ✓ Rotation des manchettes de prélèvement ajustables par levier
- ✓ Poignée d'inclinaison pour le dossier
- ✓ Dossier démontable

Coloris	Réf.
Marron	104UXB100
Gris	104UXB101
Noir	104UXB102
Lavande	104UXB103
Bleu	104UXB104



Description

- Fauteuil de prélèvement confortable et pratique.
- Dossier enveloppant, inclinable à 45° avec allongement automatique du repose-jambes.
- Son châssis en métal lui assure une stabilité maximale lors des transferts.
- Le stockage et le transport sont facilités grâce au démontage facile du dossier qui le rend plus compact.



Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : - Profondeur totale : 860 mm ;
- Profondeur de l'assise : 480 mm ;
- Largeur totale : 685 mm ;
- Largeur de l'assise efficace : 500 mm ;
- Hauteur totale : 1200 mm ;
- Hauteur du siège : 500 mm ;
- Hauteur du dossier : 750 mm ;
- Angle d'inclinaison du dossier : 13° - 45° ;
- Hauteur démonté : 490 mm ;
- Epaisseur du coussin d'assise : 100 mm ;
- Angle entre l'assise et le repose-jambes : 0° - 90°.
- **Poids** : - Poids totale : 27,8 kg ;
- Masse de la partie la plus lourde : 19,45 kg ;
- Siège : 2,85 kg.
- **Equipements en option (nous consulter)** : Tablette ; Plot d'abduction (taille M ou L) ; Porte-serum.



Conditions de stockage

- Température de stockage et d'utilisation : + 5 °C - + 40 °C.
- Humidité de stockage et d'utilisation : 30% - 70%



Montage/Démontage

- Lors de la livraison du fauteuil confort, l'assise et le dossier doivent être installés avant utilisation. L'assise et le dossier peuvent également être retirés pour un transport facile.
- **Dossier** : 1. Placer les tubes du dossier sur les tubes du cadre.
2. Appuyer sur le bouton à ressort pour faire glisser le dossier vers le bas.
3. Abaisser complètement le dossier jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- **Retirer le dossier** : appuyer sur le bouton à ressort sous le rembourrage et tirer le dossier vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache du cadre.
- **Siège** : 1. Placer les crochets à l'arrière du siège sur le tube du cadre près du dossier.
2. Appuyer sur la face avant du siège pour le fixer en place. Vous entendrez un clic.
- **Retirer le siège** : tirer sur l'avant du siège jusqu'à ce qu'il se détache du cadre.



Instructions d'entretien

- **Nettoyage** : - Risque de dommages : ne jamais utiliser un nettoyeur à vapeur pour laver le fauteuil.
- Essuyer toutes les parties rigides du fauteuil avec un chiffon humide (pas détrempé). Si nécessaire, utiliser un savon doux, approprié pour les laques et les synthétiques. Le rembourrage peut être nettoyé à l'eau tiède additionnée de savon doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou une éponge abrasifs, ni une brosse dure pour nettoyer.
- **Désinfection** : - Risque de dommages ;
- La désinfection ne peut être réalisée que par des personnes qualifiées. Se renseigner auprès du revendeur spécialisé à cet égard.



Inclinaison minimum



Inclinaison maximum