

Ouate de rembourrage orthopédique synthétique Soffban[®], réf. 102RLA



- ✓ Facile à appliquer sur un jersey coton, hydrofuge ou directement sur la peau
- ✓ Extensible et conformable
- ✓ Se déchire aisément par simple traction
- ✓ Reste en place après lissage
- ✓ Peu absorbant
- ✓ Evite la macération et le contact du plâtre ou d'un matériau synthétique avec les téguments



Description

- Bande de ouate de rembourrage en non tissé et composée de fibres synthétiques hydrofuges.
- S'applique sous tout dispositif d'immobilisation : plâtre, attelle, bandage de contention, bandage en résine, bandage rigide...
- Peu absorbant, évitant ainsi la macération et le contact du plâtre ou d'un matériau synthétique avec les téguments.



Caractéristiques techniques

- **Composition** : 100% polyester, formule sans latex, sans phtalates.
- **Coloris** : Blanc.
- **Type de dispositif** : dispositif médical à usage unique.
- **Stérilisation** : Produit livré non stérile.
- **Dimensions** : Lo 2.7 m x la 7.5 cm.
- **Contrôles qualité** : Contrôles des matières premières et des produits finis effectués par le fabricant.
- **Conditionnement** : lot de 12 bandes enroulées sur elle-mêmes, protégées par du papier imprimé et regroupées sous sachet en polyéthylène transparent.
- **Conditions de stockage** : conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- **Durée de vie** : 5 ans.
- **Année de mise sur le marché** : 1990 en France.
- **Code** : - CLADIMED : M50BA ;
- GMDN : 10669.
- **Version** : D.



Mode d'emploi

- Selon la technique utilisée, appliquer Soffban[®] sur un jersey coton (appareil en plâtre) ou hydrofuge (appareil en résine) ou directement sur la peau, en recouvrant de moitié chaque spire précédente.
- Veiller à protéger tout particulièrement les saillies osseuses en superposant 2 à 3 couches de ouate.
- Lisser soigneusement pour obtenir un rembourrage uniforme sans plis.



Précautions d'emploi

- **Indications** : Rembourrage orthopédique sous appareils d'immobilisation.
- **Contre-indications** : Aucune connue.
- **Précaution d'emploi** : Protéger les plaies ouvertes. Doit être appliquée sur peau sèche et propre.

Date de révision : 09/03/2023