

Lingette désinfectante mains et surfaces en sachet individuel



- ✓ Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi
- ✓ Efficacité de 99,9% sur les micro-organismes
- ✓ Grande taille
- ✓ Mode d'emploi simple
- ✓ A usage unique



Description

- Lingette désinfectante à l'éthanol et à la chlorhexidine, efficace sur les virus enveloppés et non enveloppés (hépatite C, coronavirus...).
- Pliée, imprégnée et emballée en sachet hermétique pour protéger le principe actif et éviter le dessèchement.
- Conforme à la norme EN 1500.
- Lingette à efficacité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
- Adaptée à la désinfection des surfaces en condition de saleté médicale.

Référence	Conditionnement
105JJE100	lot de 5
105JJA100	lot de 10
105JJB100	lot de 50
105JJC100	lot de 100
105JJD100	lot de 500



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : non tissé 100% viscose et imprégnée à 3 ml.
- **Composition** : Ethanol (Cas : n°64-17-5) ; Chlorhexidine Di gluconate (Cas : n°18472-51-0).
- **Aspect** : liquide transparent.
- **pH** : 6.00 – 8.00.
- **Densité** : 0.87 ± 0.02.
- **Dimensions** : - Pochette : 90 x 60 mm ;
- Lingette pliée : 50 x 35 mm ;
- Lingette dépliée : 180 x 110 mm.
- **Péremption** : 36 mois à partir de la date de fabrication.
- **Numéro de lot** : Sur la soudure de la dosette.
- **Contrôle** : Contrôles physico-chimiques effectués sur chaque lot.

Solution d'imprégnation actif sur	Normes	Temps de contact sur	
		mains sales	surfaces sales
Bactéries	EN 1276 / EN 1500 / EN 13697 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12 et DSM682)	30 secondes	5 minutes
Levures	EN 1650 / EN 13697 (Candida albicans, aspergillus brasiliensis)	30 secondes	5 minutes
Champignons		1 minute	15 minutes
Virus	EN 14476+A2 / EN 16777 (Adénovirus, Norovirus, Poliovirus)	1 minute	5 minutes
	EN 14476+A1 BVDV (Hépatite C)	1 minute	
	EN 14476+A2 Vaccinia virus	30 secondes	
	EN 14476+A2 Coronavirus	1 minute	

Date de révision : 23/01/2024



Mode d'emploi

- Ouvrir le sachet individuel.
- Sortir la lingette et la déplier.
- Frotter les mains ou les surfaces pendant au moins 60 secondes.
- Laisser sécher sans rincer.
- Pour les surfaces, veuillez-vous référer au tableau d'efficacité ci-dessus.



Précautions d'emploi

- **Classement du produit** : - TP1 : Produit biocide destiné à l'hygiène humaine ;
- TP2 : Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Eviter le contact avec la peau lésée, les yeux et les muqueuses.
- Ces lingettes sont destinées à un usage externe uniquement.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage.
- Usage unique.
- Liquide et vapeurs très inflammables.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition.
- Ne pas fumer.
- Eviter le rejet dans l'environnement.
- **En cas de contact avec les yeux** : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
- Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.