

## Thermomètre frontal à cristaux liquides, réf. 105TVA100



### Description

- Le lecteur frontal permet de prendre la température rapidement en 15 secondes.
- Affichage clair à cristaux liquides.
- Idéal pour les enfants en bas âge et à emporter en voyage.
- Réutilisable.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Thermomètre frontal à cristaux liquides ;  
- Etui de protection rigide ;  
- Notice d'utilisation.
- **Dimensions :** la 15 x Lo 90 x Ep. 1 mm.
- **Poids :** 10 g.
- **Type de dispositif :** dispositif médical de Classe I réutilisable.
- **Echelle de température :** de 35 à 40°C.
- **Réglementation :** Le lecteur de température est un dispositif médical de Classe I selon le Règlement Européen UE 2017/745



### Mode d'emploi

- Placez le thermomètre durant 15 secondes sur le front en tenant bien les deux extrémités.
- Lire tout de suite la température affichée ou si possible quand le thermomètre est encore placé sur le front.
- Consultez un médecin si la fièvre persiste.
- Attendez au moins 30 minutes pour prendre la température quand vous avez mangé ou bu, après une activité sportive ou quand vous venez d'un endroit très frais.
- **Conditions d'utilisation :** - Le front doit être sec ;  
- Température ambiante entre 19°C et 25°C.
- **Affichage des couleurs :** - Vert : la température affichée est correcte ;  
- Rouge : déduire 0.5°C de la température affichée ;  
- Bleu : rajouter 0.5°C à la température affichée.
- **Entretien :** nettoyez le thermomètre avec un chiffon doux et sec et gardez le bien dans son étui à l'abri de la lumière et de la chaleur.